

Крем Endo@Prep EDTA cream .

Крем Endo@Prep EDTA cream предназначен для очищения, удаления смазанного слоя и подготовки корневого канала благодаря образованию раствора кальция в хелатной форме с ионами кальция в дентине. Он хорошо очищает стенки канальцев с дентином после удаления смазанного слоя.

Показания к применению:

- Обработка корневого канала зуба при помощи ручных эндофайлов;
- Устранение кальцификации канала;
- Использование в слишком узких каналах зубов бокового ряда;
- Удаление смазанных слоев.

Инструкция по применению:

1. Нанесите Endo@Prep EDTA на эндофайл (в комплект поставки не входит);
2. Осторожно введите эндофайл в канал;
3. Нанесите Endo@Prep EDTA еще раз по необходимости для очистки канала или окончательного завершения формирования канала зуба;
4. Смойте Endo@Prep EDTA, промыв раствором натрий гипохлорид;
5. Высушите канал;
6. Внесите инструментом необходимую порцию материала для пломбирования канала.

Упаковка 2 шприца по 9г., канюли.

Срок годности 3 года.

Меры предосторожности:

1. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие в целях, не предусмотренных данной инструкцией. Используйте изделие строго в соответствии с приведенными здесь рекомендациями;
2. Изделие предназначено для продажи и использования только работниками лицензированных стоматологических клиник. Данный материал не предназначен для использования лицами, не являющимися профессиональными стоматологами;
3. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие, если защитные пломбы на упаковке повреждены или есть сомнения в их подлинности;
4. Изолируйте зуб от попадания слюны в полость рта;
5. Если изделие вызывает у пациента аллергическую реакцию или повышенную чувствительность, следует немедленно прекратить использование препарата;
6. Не допускайте попадания изделия в глаза, на слизистые оболочки, кожу и одежду:
 - в случае попадания изделия в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к офтальмологу;
 - в случае попадания изделия на слизистую оболочку, немедленно протрите пораженную область, а затем тщательно промойте большим количеством воды;
 - в случае попадания изделия на кожу или одежду, немедленно очистите пораженную область ватным или марлевым тампоном, смоченным в этиловом спирте;
 - пациент должен прополоскать рот сразу же после лечения;
7. Не используйте после истечения срока годности.