

## Двойной картридж с цементирующей пастой Any-Temp NE.


**Any-Temp NE** представляет собой временный цемент из не эвгенольного оксида цинка для цементации временной реставрации. Показания к применению:

- ☒ Временный зубной цемент;
- ☒ Временный цемент для временной фиксации ортопедических конструкций, коронок и мостов.

### Инструкция по применению:

1. Перед каждым использованием, снимите колпачок с двойного картриджа для автоматического смешивания и выдавите небольшое количество композита, убедившись, что из обоих отверстий двойного картриджа поступает одинаковое количество композита.

- Как снять колпачок: повернуть колпачок против часовой стрелки на 1/4, чтобы выступы на колпачке совпали с желобками на шприце. Держа колпачок за основание, надавить на него и повернуть, чтобы снять.

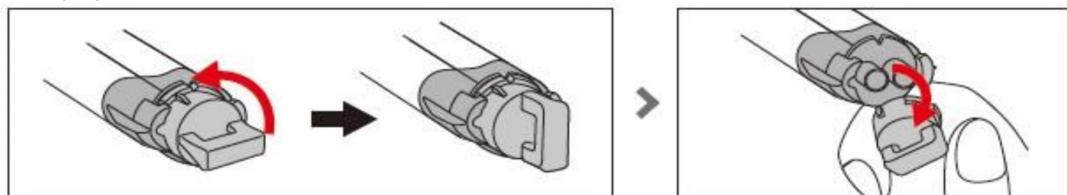

- НЕ ДОПУСКАЙТЕ контакта компонентов двойного картриджа друг с другом, это может привести к отвердеванию композита на кончике двойного картриджа. Перед новым смешиванием удалите излишек пасты с кончика двойного картриджа чистой тканью или бумажной салфеткой;

2. Выложите Any-Temp NE на пластины для замешивания (в комплект поставки не входит);

3. Осушите подготовленный зуб и внутреннюю поверхность коронки;

4. Тщательно перемешайте распределенный Any-Temp NE в течение **20 секунд**;

5. Нанесите смешанный Any-Temp NE цемент на внутреннюю поверхность коронки;

6. Зафиксируйте коронку в полости рта в течении **5 минут**;

7. Удалите лишний цемент после полимеризации материала.

Упаковка: 3 шприца \*10г, эконасадка, канюли для смешивания.

Срок годности 3 года.

### Меры предосторожности:

1. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие в целях, не предусмотренных данной инструкцией. Используйте изделие строго в соответствии с приведенными здесь рекомендациями;
2. Изделие предназначено для продажи и использования только работниками лицензированных стоматологических клиник. Данный материал не предназначен для использования лицами, не являющимися профессиональными стоматологами;
3. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие, если защитные пломбы на упаковке повреждены или есть сомнения в их подлинности;
4. Изолируйте зуб от попадания слюны в полость рта;
5. Если изделие вызывает у пациента аллергическую реакцию или повышенную чувствительность, следует немедленно прекратить использование препарата;
6. Не допускайте попадания изделия в глаза, на слизистые оболочки, кожу и одежду.
  - в случае попадания изделия в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к офтальмологу;
  - в случае попадания изделия на слизистую оболочку, немедленно протрите пораженную область, а затем тщательно промойте большим количеством воды;
  - в случае попадания изделия на кожу или одежду, немедленно очистите пораженную область ватным или марлевым тампоном, смоченным в этиловом спирте;
  - пациент должен прополоскать рот сразу же после лечения;
7. Не используйте после истечения срока годности.