

Any-Core – светоотверждаемый, рентгеноконтрастный, гибридный композит двойного отверждения для восстановления культи зуба и фиксации стекловолоконных штифтов в корневом канале зуба.


Any-Core – усиленный композитный материал для пломб.

Показания к применению:


- ☑ Все виды пломбирования зубов и корневых каналов.

Для восстановления полости зуба:

1. Изолировать зуб коффердамом от слизистой и контакта со слюной;
 2. Провести механическую подготовку полости зуба для пломбирования;
 3. Полость обработать травильным гелем, а потом тщательно промыть водой (по инструкции);
 4. Обработать полость адгезивом Any-Bond согласно инструкции производителя;
 5. Перед каждым использованием, снимите колпачок с двойного картриджа для автоматического смешивания и выдавите небольшое количество композита, убедившись, что из обеих отверстий двойного картриджа поступает одинаковое количество композита.
- Как снять колпачок: повернуть колпачок против часовой стрелки на 1/4, чтобы выступы на колпачке совпали с желобками на шприце. Держа колпачок за основание, надавить на него и повернуть, чтобы снять.

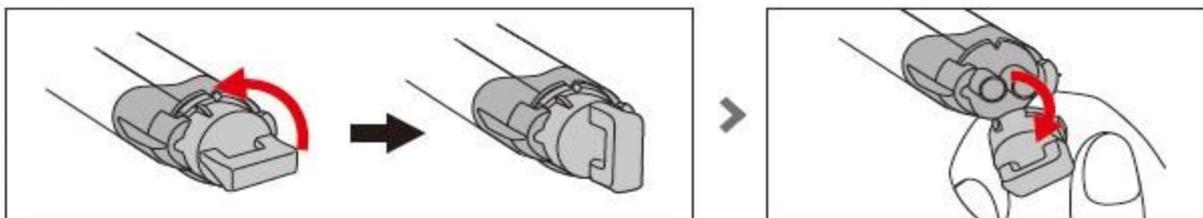

- НЕ ДОПУСКАЙТЕ контакта компонентов двойного картриджа друг с другом, это может привести к отверждению композита на кончике двойного картриджа. Перед новым смешиванием удалите излишек пасты с кончика двойного картриджа чистой тканью или бумажной салфеткой. Насадите на двойной картридж наконечник для смешивания, выдавите пасту из двойного картриджа и нанесите смешанную пасту на рабочую поверхность в полости рта. Как зафиксировать наконечник для смешивания: сделайте так, чтобы выступы на адаптере как можно точнее совпадали с желобками на шприце, и поверните наконечник по часовой стрелке на 1/4 до его надежного закрепления.

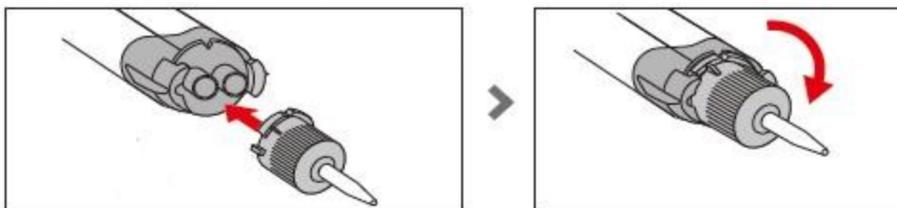

- Убедитесь в том, что наконечник для смешивания надет на двойной картридж, когда вы наносите цементирующую пасту на поверхность, подлежащую реставрации.
- После использования, снимите наконечник для смешивания с двойного картриджа и снова наденьте на него колпачок для двойного картриджа;
- 6.** Any-Core полимеризуется под действием света в течение минимум **40 секунд**. (Максимальная толщина слоя ≤4 мм.). Более тонкий слой (≤2 мм) твердеет в течение приблизительно **20 секунд**.

Для пломбирования канала зуба:

1. Поверхность зуба со всех сторон очищается и изолируется согласно инструкции;
 2. Корневой канал зуба готовится к внесению корневого штифта;
 3. Применяется травящий агент и соединение, в соответствии с инструкцией производителя;
- *Если используется светоотверждаемое соединение, то предварительно удаляется его избыток из канала перед воздействием света.*

4. Any-Core вводится в корневой канал для фиксации корневого штифта. **Время отверждения составляет 90– 120 секунд.** 5. Вставьте корневой штифт во внутреннюю часть корневого канала, регулируя его положение. Время отверждения под действием света составляет 20 секунд. Если мощность света ниже 400 м/см^2 , необходимо увеличить время полимеризации. Время отверждения без участия катализатора составляет **5 минут**. В зонах, недоступных для действия света, состав твердеет самостоятельно.

Упаковка:

- Двойной шприц 9 г x 2 шт.
- Наконечники для смешивания – 20 шт.
- Насадки – 10 шт.
- Интраоральный наконечник – 10 шт.

Оттенок: цвет зубной эмали.

Срок хранения 3 года.

Меры предосторожности:

1. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие в целях, не предусмотренных данной инструкцией. Используйте изделие строго в соответствии с приведенными здесь рекомендациями;
2. Изделие предназначено для продажи и использования только работниками лицензированных стоматологических клиник. Данный материал не предназначен для использования лицами, не являющимися профессиональными стоматологами;
3. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие, если защитные пломбы на упаковке повреждены или есть сомнения в их подлинности;
4. Изолируйте зуб от попадания слюны в полость рта;
5. Если изделие вызывает у пациента аллергическую реакцию или повышенную чувствительность, следует немедленно прекратить использование препарата;
6. Не допускайте попадания изделия в глаза, на слизистые оболочки, кожу и одежду:
 - в случае попадания изделия в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к офтальмологу.
 - в случае попадания изделия на слизистую оболочку, немедленно протрите пораженную область, а затем тщательно промойте большим количеством воды.
 - в случае попадания изделия на кожу или одежду, немедленно очистите пораженную область ватным или марлевым тампоном, смоченным в этиловом спирте.
 - пациент должен прополоскать рот сразу же после лечения.
7. Не используйте после истечения срока годности.

ВНИМАНИЕ! Применять только с материалами, не содержащими эвгенол.