

Композит Any-Com Flow.

Any-Com Flow представляет собой светоотверждаемую, рентгеноконтрастную, нано-гибридную композитную смолу для передних и задних реставраций.

Any-Com Flow - это усиленный цирконием пломбировочный композит.

Показания к применению:


- Реставрация дефектов полости класс V;
- Реставрация дефектов небольшой полости класс I, II, III;
- Прокладка в сочетании с составом высокой вязкости;
- Восстановление существующего композитного пломбировочного материала, вкладок, накладок или виниров;
- Восстановление коронок и мостов из бисфенол А глицидил метакрилата;
- Герметизация фиссур и слепых ямок;
- Цементация прозрачных ортодонтических ретейнеров;
- Шинирование травматически ослабленных зубов или зубов с ослабленным пародонтом.

Инструкция по применению:

Выбор оттенка Any-Com Flow по расцветке Vita:

Выбор оттенка должен производиться до начала реставрации, то есть тогда, когда зубы еще увлажнены. Перед выбором оттенка удалить все внешние наросты и налет. Для подбора оттенка используйте шкалу VITA classical. Оттенок, который Вы получите, используя материал Any-Com Flow, соответствует средней части зуба на шкале Vita classical.

1. Подготовить полость.
2. Нанести материал для травления структуры зуба Any-Etch в соответствии с настоящей инструкцией.
3. Нанести адгезив Any-Bond в соответствии с настоящей инструкцией.
4. Снимите колпачок шприца (1). После снятия колпачка следует прикрутить на шприц одноразовый наконечник, с помощью которого внесение композита производится непосредственно в подготовленную полость. Для этого держа в руке шприц, наденьте на него наконечник. Вращайте наконечник по часовой стрелке до тех пор, пока он не окажется тщательно зафиксированным (2). Наконечники разработаны специально для композита Any-Com Flow. Не используйте наконечники других марок.
 - При установке наконечника используйте перчатки.

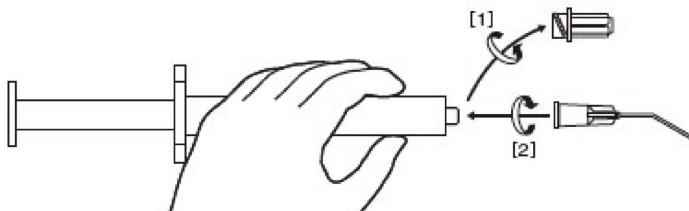

Дозируйте материал умеренным надавливанием на поршень шприца. Никогда не совершайте обратного движения поршня шприца, так как это может привести к контаминации композита. Снимите и утилизируйте использованный наконечник, вытрите кончик шприца салфеткой и немедленно закройте шприц колпачком.

5. Данные композиты поставляются нестерильным, и не предполагается их стерилизация перед использованием.
6. Нанести композит Any-Com Flow.
7. При заполнении полостей больше 2 мм материал наносится и полимеризуется послойно.
8. Держать световой наконечник лампы максимально близко к отверждаемой поверхности.
9. Полимеризация светом длится от 10 до 20 секунд. **Слой нанесения: 2-2,5 мм. - 10-15 секунд, слой 5 мм. - 20 секунд.** **Если мощность света лампы ниже 400 м/см², необходимо увеличить время полимеризации.**
10. После полимеризации проверить окклюзию, произвести шлифовку и полировку поверхности пломбы.

Срок годности 3 года.

Оттенки: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D2 OA2 OA3 TL OWT YTL RTL

Упаковка: отдельный шприц (2 шпр.*2г), Any-Com Flow kit (4 шпр.*2г, Any-Etch 3 мл).

Меры предосторожности:

1. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие в целях, не предусмотренных данной инструкцией. Используйте изделие строго в соответствии с приведенными здесь рекомендациями.
2. Изделие предназначено для продажи и использования только работниками лицензированных стоматологических клиник. Данный материал не предназначен для использования лицами, не являющимися профессиональными стоматологами.
3. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие, если защитные пломбы на упаковке повреждены или есть сомнения в их подлинности.
4. Изолируйте зуб от попадания слюны в полость рта.
5. Если изделие вызывает у пациента аллергическую реакцию или повышенную чувствительность, следует немедленно прекратить использование препарата.
6. Не допускайте попадания изделия в глаза, на слизистые оболочки, кожу и одежду.
 - в случае попадания изделия в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к офтальмологу.
 - в случае попадания изделия на слизистую оболочку, немедленно протрите пораженную область, а затем тщательно промойте большим количеством воды.
 - в случае попадания изделия на кожу или одежду, немедленно очистите пораженную область ватным или марлевым тампоном, смоченным в этиловом спирте.
 - пациент должен прополоскать рот сразу же после лечения.
7. Не используйте после истечения срока годности.

Хранение

1. Не хранить при повышенной температуре или ярком свете.
2. Хранить в прохладном месте.