

The-SEP - изолирующее средство в виде крема на водорастворимой основе. Используется в качестве внутри ротового зубного средства для предотвращения адгезии материалов для зубных смол, таких как связующие вещества, цемент, к тем участкам, где склеивание нежелательно.

Содержит гидрофильные полимеры и высвобождающую плёнку с покрытием, он размягчается в воде и легко удаляется при промывании водой.

Показания к применению:

- При цементировании протеза предварительно нанесите покрытие на поверхности, которое не будет склеиваться, для облегчения очистки.
- При подготовке временной коронки из смолы предварительно нанесите на абатмент зуба для обеспечения отделения.
- В случае временного удаления полости, защищённой смолой (подкладка, покрытие, композитная смола), нанесите покрытие на поверхность смолы перед тем, как поместить смолистую временную остановку для последующего более легкого удаления.

Инструкция по применению:

1. Нанесите The-SEP с помощью кисточки на изолируемую поверхность тонким **слоем 0,2 мм.**;
2. Нанесите временный цемент на временный протез и установите на зуб;
3. Повторите описанную выше процедуру, если вам нужно повторно примерить временный протез;
4. После идентификации временного протеза, оставшийся The-SEP удаляется водой.

ВНИМАНИЕ !

- Не используйте у пациентов, у которых наблюдается гиперчувствительность или дерматит.
- Не используйте после истечения срока годности.
- Хранить в прохладном месте, не доступном свету.

Срок годности 2 года.

Упаковка: пластиковые боксы, 2 шпр. * 5 мл. цвет белый, синий.