

**Dentto-Etch** - гель для травления эмали и дентина.

**Гель Dentto-Etch** представляет собой 37% раствор фосфорной кислоты идеальной вязкости. Он обеспечивает точное нанесение и превосходный контроль в любой точке. Препарат используют для травления структуры зуба перед нанесением композита, пломбы или адгезива.

**Инструкция по применению:**

1. Подготовить полость зуба. Очистите и высушите полость. Для изоляции предпочтительно использовать коффердам;
2. Снимите колпачок шприца. После снятия колпачка следует прикрутить на шприц одноразовый наконечник, с помощью которого нанесение геля производится непосредственно в подготовленную полость. Для этого держа в руке шприц, наденьте на него наконечник. Вращайте наконечник по часовой стрелке до тех пор, пока он не окажется тщательно зафиксированным. Наконечники разработаны специально для геля Dentto-Etch, не используйте наконечники для других изделий. При установке наконечника используйте перчатки. Дозируйте материал умеренным надавливанием на поршень шприца. Снимите и утилизируйте использованный наконечник, вытрите кончик шприца салфеткой и немедленно закройте шприц колпачком;
3. Нанесите Dentto-Etch (гель 37% фосфорной кислоты) на эмаль и дентин зуба и выдерживайте в течении: **эмаль - около 15 секунд; дентин - около 10 секунд;**
4. Тщательно промойте полость зуба (примерно 20 секунд);
5. Высушите полость рта.

**ВАЖНО !**

Избегайте любого загрязнения полости слюной или кровью на подготовленном участке для следующего лечения.

**ВНИМАНИЕ !**

Dentto-Etch является едким веществом и содержит фосфорную кислоту.

Срок хранения 3 года.

Упаковка: 5 шпр. \* 3мл., насадки канюли.

**Меры предосторожности:**

1. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие в целях, не предусмотренных данной инструкцией. Используйте изделие строго в соответствии с приведёнными здесь рекомендациями;
2. Изделие предназначено для продажи и использования только работниками лицензированных стоматологических клиник. Данный материал не предназначен для использования лицами, не являющимися профессиональными стоматологами;
3. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие, если защитные пломбы на упаковке повреждены или есть сомнения в их подлинности;
4. Изолируйте зуб от попадания слюны в полость рта;
5. Если изделие вызывает у пациента аллергическую реакцию или повышенную чувствительность, следует немедленно прекратить использование препарата;
6. Не допускайте попадания изделия в глаза, на слизистую оболочку, кожу и одежду:
  - в случае попадания изделия в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к офтальмологу;
  - в случае попадания изделия на слизистую оболочку, немедленно протрите поражённую область, а затем тщательно промойте большим количеством воды;
  - в случае попадания изделия на кожу или одежду, немедленно очистите поражённую область ватным или марлевым тампоном, смоченным в этиловом спирте;
  - пациент должен прополоскать рот сразу же после лечения;
7. Не используйте после истечения срока годности.